

GRAZIE AL NATURALE POTERE TERAPEUTICO DEL CALORE, IL CEROTTO DONA SOLLIEVO IN CASO DI DOLORI MESTRUALI

ISTRUZIONI PER L'USO

- Assicurarsi che la pelle sia pulita e asciutta prima dell'uso.
- Aprire l'involucro e rimuovere il cerotto.
- Staccare la pellicola protettiva dal retro del cerotto.
- Applicare saldamente il lato adesivo del cerotto sulla pelle.
- Il cerotto termico si riscalda gradualmente.
- Per la massima efficacia, utilizzare fino a 8 ore.
- Dopo l'uso, staccare lentamente il cerotto e smaltirlo secondo le disposizioni del proprio Comune.

NON UTILIZZARE NEI SEGUENTI CASI

- Su pelle contusa, irritata, sensibile o rotta.
- Assieme a creme, lozioni o altre fonti di calore.
- Mentre si dorme.
- Sui bambini fino a 12 anni.
- Se il cerotto è danneggiato o strappato.
- Su aree del corpo in cui il calore non può essere percepito.
- Se si è costretti a letto o si è soggetti a ulcere cutanee.
- Sulla stessa area per più di 8 ore nell'arco delle 24 ore.

AVVERTENZE

- I cerotti riscaldanti possono causare irritazioni cutanee, ustioni o vesciche.
- Controllare frequentemente la pelle durante l'uso.
- Sospendere immediatamente l'uso se la pelle diventa sensibile o il calore del cerotto diventa insopportabile.
- **SOPRA I 55 ANNI DI ETÀ NON INDOSSARE IL CEROTTO A DIRETTO CONTATTO CON LA PELLE, MA SOPRA UN SOTTILE INDUMENTO.**
All'aumentare dell'età la pelle è più delicata.
- In caso di gravidanza, diabete, problemi circolatori, patologie cutanee o allergia all'adesivo, consultare il medico prima dell'uso.
- **NON UTILIZZARE IL CEROTTO QUANDO SI DORME.**
- Solo per uso esterno.
- Non tagliare o strappare il cerotto.
- Il contenuto del cerotto riscaldante può essere nocivo se ingerito o se entra in contatto con la pelle o gli occhi.
- Sciacquare immediatamente con acqua se il contenuto entra in contatto con la pelle o gli occhi e consultare un medico.
- Se ingerito sciacquare subito la bocca con abbondante acqua senza ingoiarla. Consultare un medico.
- In caso di pelle invecchiata o delicata, applicare il lato adesivo del cerotto sugli indumenti.
- Non scaldare o riscaldare il cerotto nel microonde.
- Utilizzare sempre sotto la supervisione di un adulto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Solo monouso.
- Conservare in luogo fresco e asciutto.
- Utilizzare entro la data di scadenza indicata.
- Dopo l'uso, gettare il cerotto tra i rifiuti domestici secondo le disposizioni del proprio comune in merito alla raccolta differenziata.
- È normale che si verifichi un leggero arrossamento della pelle dopo la rimozione del cerotto.
- Il cerotto contiene ferro, carbone attivo e acqua.

MADE IN CHINA
Rev1 03/03/2025
© Copyright PPH 2025

REF YK1004

Cod. 673.55



LOT



PIETRASANTA PHARMA S.p.A.
Via di Caprino, 7 - 55012 (LU) - Italy
www.pietrasantapharma.it



Intco Medical (HK) Co., LTD.
Flat/Rm 19C, Lockhart Centre,
301-307 Lockhart Road, Wan Chai,
Hong Kong +8651183174088

EU REP

MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163
Münster, Germany

