

**GRAZIE AL NATURALE POTERE TERAPEUTICO DEL CALORE, LA FASCIA DONA SOLLIEVO AI DOLORI MUSCOLARI E ARTICOLARI ASSOCIATI A SFORZI ECCESSIVI, DISTORSIONI E ARTRITE**

#### ISTRUZIONI PER L'USO

- Quando si è pronti ad utilizzare la fascia, aprire la confezione.
- Togliere prima il foglio protettivo di carta siliconata: applicarla sulla parte dolente direttamente sulla pelle, premendo con energia.
- Togliere l'altro lembo della carta siliconata e terminare l'applicazione sempre premendo con energia. Per raggiungere la massima temperatura d'esercizio sono necessari circa 30 minuti.
- Per la massima efficacia si consiglia di indossare la fascia per almeno 8 ore.
- La fascia, sia calda che fredda, può essere gettata nei normali rifiuti domestici.

#### NON UTILIZZARE NEI SEGUENTI CASI

- Se la fascia è danneggiata e/o il materiale contenuto all'interno sta fuoriuscendo.
- Contemporaneamente a creme e/o unguenti medicati, cerotti o altre fonti di calore.
- Su lividi e gonfiori comparsi nelle ultime 48 ore.
- Sulle zone corporee rivelatesi insensibili al calore.
- Da persone che non siano in grado di rimuovere il prodotto autonomamente, inclusi bambini sotto i 12 anni e anziani non autosufficienti.
- Da persone costrette a letto e/o con piaghe da decubito.
- Con nessun'altra forma di calore terapeutico, compresa ogni forma di riscaldamento con elettricità (termocoperte, stimolatori elettrici, ecc.).

#### AVVERTENZE

Dopo avere utilizzato il prodotto e aver rimosso la fascia, è normale che la pelle sottostante sia arrossata e resti tale per un pò di tempo (è variabile da soggetto a soggetto). Questo prodotto può causare scottature.

#### Per ridurre il rischio:

- Applicare unicamente su cute sana.
- Durante l'uso del prodotto controllare periodicamente lo stato della pelle su cui è applicata la fascia per verificare la presenza di eventuali segni di irritazioni o scottature e, nel caso si riscontrassero, sospendere subito l'uso rimuovendola.
- **Sopra i 55 anni di età non indossare la fascia a diretto contatto con la pelle, ma sopra un sottile indumento.**  
All'aumentare dell'età la pelle è più delicata.
- NON UTILIZZARE LA FASCIA QUANDO SI DORME.
- Rimuovere il prodotto prima di sottoporsi ad esami RM (Risonanza Magnetica).
- Non utilizzare per più di 8 ore nell'arco delle 24 ore.
- Non esercitare una pressione eccessiva sul prodotto indossato (per esempio addormentandosi sopra).
- NON RISCALDARE MAI IL PRODOTTO NEL FORNO A MICROONDE NÉ IN ALCUN ALTRO MODO.
- Tenere il prodotto lontano dai bambini e dagli animali domestici.
- Conservare il prodotto a temperatura ambiente.
- **Chiedere il parere del proprio medico curante prima dell'uso nei casi di:** diabete, problemi di circolazione, malattie cardiache, artrite reumatoide e gravidanza.

#### Interrompere l'uso del prodotto e consultare un medico se:

- Si avvertisse fastidio, bruciore, gonfiore, arrossamento o qualsiasi altro cambiamento persistente dello stato della pelle nella zona dove si è applicato il prodotto.
- Se il dolore aumentasse o rimanesse invariato dopo 7 giorni dalla sua prima comparsa.

#### AVVERTENZE IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE COL MATERIALE CONTENUTO ALL'INTERNO

**Pelle:** lavare immediatamente la pelle con sapone e con moltissima acqua. Se l'irritazione persiste consultare un medico.

**Occhi:** sciacquare con una grande quantità di acqua per almeno 15 minuti. Assicurarsi un abbondante risciacquo dell'interno dell'occhio tenendolo aperto, quando separate le palpebre con le dita. Se l'irritazione persiste consultare un medico.

**Vie respiratorie (per inalazione):** respirare a fondo aria fresca e pulita. Se necessario consultare un medico.

**Via orale:** se ingerito sciacquare subito la bocca con abbondante acqua senza ingoiarla. Consultare un medico.

 **Intco Medical (HK) Co., LTD.**  
Flat/Rm 19C, Lockhart Centre,  
301-307 Lockhart Road, Wan Chai,  
Hong Kong +8651183174088



**PIETRASANTA PHARMA S.p.A.**  
Via di Caprino, 7 - 55012 (LU) - Italy  
[www.pietrasantapharma.it](http://www.pietrasantapharma.it)



**MedNet EC-REP GmbH**  
Borkstrasse 10, 48163  
Münster, Germany

**REF** YB0801



**CE** 0197



**Cod.** 673.45

**LOT**

MADE IN CHINA  
Rev.1 03/03/2025  
© Copyright PPH 2025



8 032956 145940 >